

## Mirage Micro™

MASQUE NASAL

### Guide de mise en place



- Tournez la molette de réglage MicroFit™ jusqu'à la position 24, dans laquelle le support frontal est étiré au maximum.



- Détachez un des clips du harnais, mettez le masque sur le visage et passez le harnais par-dessus la tête.



- Ramenez les sangles inférieures sous les oreilles.
- Fermez le clip inférieur du harnais en vous assurant qu'il se verrouille bien en position.



- Défaites les bandes Velcro™ supérieures, tirez sur les sangles du harnais uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortable, puis rattachiez les bandes Velcro.
- Ne serrez pas trop les sangles.



- Répétez l'étape 4 pour les sangles inférieures du harnais.
- Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la pièce pivotante et l'autre extrémité à l'appareil.
- Mettez l'appareil sous tension.



- Allongez-vous, puis tournez la molette MicroFit jusqu'à ce que le masque soit uniformément en place sur le visage tout en étant confortable.
- Si vous sentez des fuites d'air, ajustez le réglage de la molette et/ou le harnais.

⚠ Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au *Guide utilisateur du masque nasal Mirage Micro*.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australie, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro gratuit). Bureaux ResMed : Allemagne, Autriche, Brésil, Chine, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse (voir site Internet pour de plus amples informations). Protégé par les brevets suivants : AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, DE 29724224 U, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Autres brevets en attente. Modèles déposés : AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Autres modèles en attente. Mirage et Mirage Micro sont des marques commerciales de ResMed Ltd, et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V. © 2007 ResMed Ltd. 1012216/1 07 12